


Es ist nicht irgendein Honig  
Es ist **MEDIHONEY<sup>TM</sup>**



## ANTIBAKTERIELLES WUNDGEL

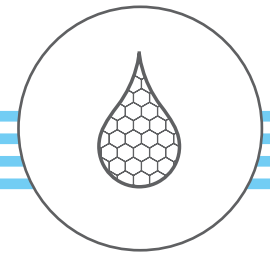

**Medihoney<sup>TM</sup> Antibakterielles Wundgel** ist ein Präparat für die topische Anwendung auf chronischen und akuten Wunden.

Durch eine spezielle Formulatur wurden 80 % Medihoney<sup>TM</sup> Antibakterieller Honig mit natürlichen Wachsen und Ölen kombiniert, um ein Gel mit hoher Viskosität für die leichte Applikation und guten Abspüleigenschaften beim Verbandwechsel zu erhalten.


**Medihoney<sup>TM</sup> Antibakterielles Wundgel** hat nachweislich folgende klinisch wirksame Eigenschaften:

- Hemmung von Bakterien auf dem Wundgrund (effektiv gegen mehr als 200 klinische Isolate)
- Schnelles und effektives autolytisches Debridement von belegten und nekrotischen Wunden
- Schaffung eines antibakteriellen Milieus
- Rasche Geruchstilgung übel riechender Wunden
- Schaffung einer für die Heilung wichtigen feuchten Wundumgebung, womit auch Schmerzen beim Verbandwechsel reduziert werden.

### INDIKATIONEN

- Chirurgische Wunden
- Akute und chronische Wunden
- Verbrennungen
- Fuß-/Beinulzera
- Dekubiti
- Transplantationsstellen (Spender und Empfänger)


### HERVORRAGENDE KONDITIONIERUNG DES WUNDGRUNDS

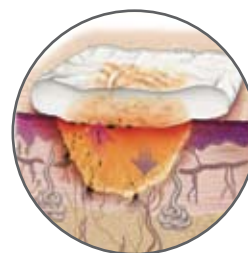

Durch das hohe osmotische Potenzial des **Medihoney<sup>TM</sup> Antibakteriellen Wundgels** wird die Exsudatbildung begünstigt. Dadurch werden Bakterien, Endotoxine und nekrotisches Gewebe aus der Wunde in die Wundauflage gespült und beim Verbandwechsel, welcher ebenfalls dadurch erleichtert wird, entfernt. Weiterhin wird ein antibakteriell wirksames Milieu gebildet.

Ein Produkt, 3 Wirkungen  
Wundschutz | Wundreinigung | Wundheilung

# ANTIBAKTERIELLES WUNDGEL

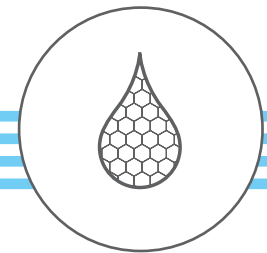

## HINWEISE ZUR ANWENDUNG

1. Medihoney™ Schutzcreme auf Wundränder auftragen.
2. Medihoney™ Antibakterielles Wundgel kann direkt auf den Wundgrund aufgetragen werden.
3. Stellen Sie sicher, dass Medihoney™ Antibakterielles Wundgel in vollständigem Kontakt mit dem Wundgrund ist (ca. 3 mm Schichtdicke).
4. Zur Abdeckung von Medihoney™ Antibakteriellem Wundgel sollte ein nicht-adhärenter Wundverband verwendet werden.
5. Als weitere Auflage sollte ein geeigneter Wundverband für das Exsudatmanagement verwendet werden.
6. Medihoney™ Antibakterielles Wundgel kann abhängig vom vorhandenen Wundsekret bis zu 7 Tage auf der Wunde belassen werden.
7. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Monaten verbrauchen.
8. Tube kann mit Kappenfortsatz verschlossen werden.

## BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKTNAME	GRÖSSE	PACKUNG	PZN
Medihoney™ Antibakterielles Wundgel	20 g wiederverschließbare Tuben	5 Tuben pro Schachtel	4920252

verordnungs- und erstattungsfähig

Klinische und In-vitro-Untersuchungen haben gezeigt, dass Medihoney™ Antibakterieller Medizinischer Honig schon in niedrigen Konzentrationen wirksam gegen ein breites Spektrum von Bakterien, auch antibiotikaresistente Stämme ist.

## MIK GEGEN 127 RESISTENTE KLINISCHE ISOLATE (1990-2004)

Narelle George, Qld Health Pathology and Scientific Services, Royal Brisbane Hospital

\*nm. nicht multiresistent

