


Es ist nicht irgendein Honig  
Es ist **MEDIHONEY<sup>TM</sup>**



## ANTIBAKTERIELLER GELVERBAND

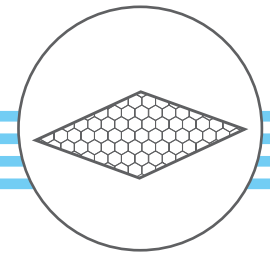

**Medihoney<sup>TM</sup> Antibakterieller Gelverband** ist eine sterile, nicht-adhärenente Wundauflage, welche aus antibakteriellem Leptospermum-Honig (80 % w/w) und einem für die Wundheilung geeignetem Alginat (20 % w/w) besteht.

**Medihoney<sup>TM</sup> Antibakterieller Gelverband** ist für leicht bis mäßig exsudierende Wunden geeignet. Der Verband

- sorgt für ein feuchtes Wundmilieu zur Förderung der Heilung sowie der Reduktion von Schmerzen beim Verbandwechsel
- schützt die Wunde vor Wundkeimen, einschließlich antibiotikaresistenter Stämme
- bewirkt ein schnelles und effektives autolytisches Debridement von belegten und nekrotischen Wunden
- bewirkt die rasche Geruchstilgung übelriechender Wunden

### INDIKATIONEN

- Fuß-/Beinulzera
- Dekubiti
- Infizierte Wunden
- Verbrennungen
- Belegte Wunden
- Übel riechende Wunden
- Transplantationsstellen (Spender und Empfänger)


### HERVORRAGENDE KONDITIONIERUNG DES WUNDGRUNDS

**Medihoney<sup>TM</sup> Antibakterieller Gelverband** schützt die Wunde gegen Wundkeime, auch antibiotikaresistenter Stämme, womit das Risiko einer Infektion vermindert wird. Durch das hohe osmotische Potenzial der Wundauflage wird die Sekretbildung anfangs begünstigt, wodurch Bakterien, Endotoxine, Beläge und nekrotisches Gewebe aus der Wunde gespült werden und eine rasche Geruchstilgung eintritt. Das Resultat ist eine saubere Wunde, wodurch Entzündungen, Ödeme und die Exsudation vermindert werden. Durch die Herstellung des optimalen Heilungsmilieus werden die Granulation und Epithelisierung gefördert.

Ein Produkt, 3 Wirkungen

Wundschutz | Wundreinigung | Wundheilung

# ANTIBAKTERIELLER GELVERBAND

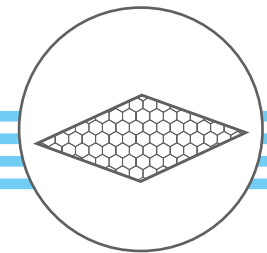

## HINWEISE ZUR ANWENDUNG

1. Wundränder mit Medihoney™ Schutzcreme schützen.
2. Folien des Medihoney™ Antibakteriellen Gelverbands vor Applikation auf die Wunde entfernen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Medihoney™ Antibakterielle Gelverband in vollständigem Kontakt mit dem Wundgrund ist. Zur Abdeckung großer oder tiefer Wunden können mehrere Verbände neben- bzw. übereinander platziert werden. Alternativ kann die Wunde auch erst mit Medihoney™ Antibakteriellem Medizinischem Honig und darüber mit Medihoney™ Antibakteriellem Gelverband abgedeckt werden.
4. Der Medihoney™ Antibakterielle Gelverband sollte mit einem sterilen, nicht-adhärennten Verband abgedeckt werden, welcher ein ausreichendes Exsudatmanagement gewährleisten sollte.
5. Die Wunde sollte bei jedem Verbandwechsel nach Standardmethoden gereinigt werden.

**Häufigkeit des Verbandwechsels:** Der Medihoney™ Antibakterielle Gelverband sollte nach Gelbildung und Verdünnung durch Wundexsudat gewechselt werden. Der Verband kann bei leichter Exsudatbildung bis zu sieben Tage auf der Wunde belassen werden. Sollte eine Mazeration des Wundrandes auftreten, sollte der Gelverband häufiger gewechselt werden.

## KONTRAINDIKATIONEN

Bei einer bestehenden Allergie gegen Honig oder Natriumalginat sollte der Gelverband nicht verwendet werden.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Wegen der Eigenschaften von Honig kann es vereinzelt zu Beschwerden wie Brennen oder einem ziehenden Schmerz bei der Applikation kommen. Diese sind in der Regel nur kurzzeitig. Sollten diese Beschwerden inakzeptabel sein, sollte der Verband entfernt und die Wunde gereinigt werden.
- Dieses Produkt ist am besten für leicht bis mäßig exsudierende Wunden geeignet. Trockene Wunden sollten idealerweise mit Medihoney™ Antibakteriellem Medizinischem Honig oder Medihoney™ Antibakteriellem Wundgel gepflegt werden.
- Der Medihoney™ Gelverband sollte mit Vorsicht und unter Beobachtung bei stark exsudierenden Wunden, arteriellen Ulzera und blutenden Wunden angewendet werden.
- Nicht für innere Körperhöhlen empfohlen.
- Sollte die Heilung nur langsam oder gar nicht einsetzen, sollten die Pflegemethoden überprüft werden.

## BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKTNAME	GRÖSSE	PACKUNG	PZN
Medihoney™ Antibakterieller Gelverband	5 cm x 5 cm	10 Verbände	5994838
	10 cm x 10 cm	10 Verbände	5994844

verordnungs- und erstattungsfähig

Der Großhandel und Klinikumsapotheken bestellen bei:

ApoFit Arzneimittelvertrieb GmbH  
Pestalozzistr. 11  
96129 Strullendorf  
Tel.: 09543/440 19 0  
Fax: 09543/440 19 23  
info@apofit-gmbh.de  
www.apofit-gmbh.de

**ApoFit**

Patienten bekommen die Medihoney™ Produkte in der Apotheke.